



Hinweise zur Benutzung der George Bissregistrierung ^{TM*}

- 1 Gehäuse der George Bissgabel TM
- 2 Millimeterskala
- 3 UK-Klemmschraube
- 4 OK-Klemmschraube
- 5 UK-Mittellinienanzeige
- 6 UK-Schneidezahn-Nut

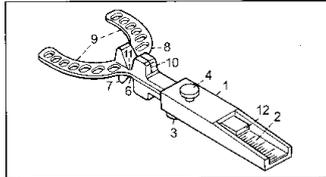


- 7 UK-Schneidezahnklammer
- 8 Bissgabel
- 9 Seitenarme der Bissgabel
- 10 OK-Mittellinienanzeige
- 11 OK-Schneidezahn-Nut
- 12 Markierungsende der Bissgabel

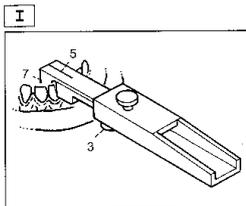

I Lockern Sie die untere Klemmschraube (3) und schieben sie die UK-Schneidezahnklammer (7) vorwärts.

Zentrieren Sie die untere Mittellinienanzeige (5) über den mittleren UK-Schneidezähnen, fixieren Sie die UK-Schneidezahnklammer (7) und ziehen Sie die untere Klemmschraube (3) an.


Nehmen Sie die George Bissregistrierung aus dem Mund und schieben Sie die benötigte Bissgabel (8) in das Gehäuse (1). Benutzen Sie die graue Gabel für 2 mm oder die weiße für 5 mm Sperre zwischen den Schneidezähnen.

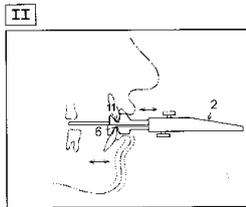


II Setzen Sie die George Bissgabel in den Mund ein, mit der UK-Schneidezahn-Aussparung (6) mittig über den UK-Schneidezähnen, und weisen Sie den Patienten an, den Mund zu schließen und dabei in die OK-Schneidezahn-Aussparung (11) zu beißen, dabei soll die OK-Mittellinienanzeige (10) zwischen den OK-Schneidezähnen liegen.

Benutzen Sie einen Fräser, um evtl. die Aussparung für die OK-Schneidezähne zu vergrößern, falls diese z.B. stark rotiert sind.

Weisen Sie den Patienten an, den UK zuerst in Zentriklage zu schieben, dann so weit wie möglich in die Protrusion, während Sie diese Positionen auf der Millimeterskala (2) beobachten und evtl. mit Bleistift markieren.

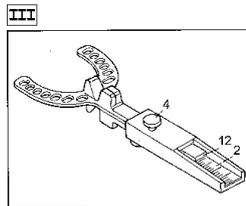


III Aufgrund dieses Protrusionsbereiches kalkulieren Sie den Wert für die benötigte Protrusion für das Gerät, welches Sie für diesen Patienten anfertigen. Nehmen Sie die George Bissgabel aus dem Mund und stellen Sie das Markierungsende der Bissgabel (12) auf die ermittelte Position der Millimeterskala (2) ein und befestigen Sie die obere Klemmschraube (4).

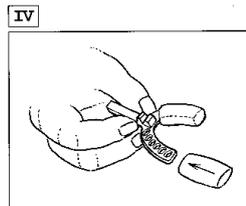

IV Geben Sie das Bissnahmematerial (Wachs oder Silikon) auf die Seitenarme der Bissgabel (9).

Setzen Sie die George Bissregistrierung wieder in den Mund ein, UK-Nut zentriert über UK-Schneidezähnen. Weisen Sie Ihren Patienten an, mit Hilfe eines Spiegels in die OK-Schneidezahn-Nut einzubeißen.

Falls es erforderlich ist, eine Mittellinienabweichung beizubehalten, setzen Sie eine Markierung auf den OK, um beim Patienten eine korrekte Transversalschließung zu erreichen.

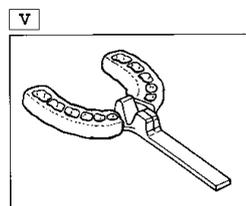

V Das Bissnahmematerial kann aus dem Mund entnommen werden, nachdem es genügend ausgehärtet ist. Geben Sie den Konstruktionsbiss und die Bissgabel (8) zusammen mit den Modellen in Ihr Labor.

Lieferprogramm

George Bissregistrierung, inkl. 2/5 mm Bissgabeln	1 Set	Art.-Nr. 5471
George Bissgabel 2 mm	10 St.	Art.-Nr. 5472
George Bissgabel 5 mm	10 St.	Art.-Nr. 5473



SCHEU // DENTAL

SCHEU-DENTAL GmbH · P.O. Box 75 62 · D-58813 Iserlohn · Tel. +49 (0) 23 74 / 92 88-0 · Fax -90 · www.scheu-dental.com

