

SchnarchSchiene - Infos für Zahnärzte

Allgemein

Für eine UPS-Zahnschiene benötigen wir einen präzisen OK- sowie einen UK-Alginat und einen Konstruktionsbiss.

Die Lieferzeit der UPS beläuft sich auf drei Wochen.

Bitte notieren Sie auf dem Auftragsformular

- die Adresse des Patienten
- nützliche Hinweise wie etwa Knirschen oder Bruxismus

Bissregistrierung

Die Protrusion für den Konstruktionsbiss soll 60-70% der maximalen Protrusion sowie die Bissöffnung bei den Inzisiven mindestens 4 Millimeter betragen. Im Falle einer ausgeprägten Speekurve sollte die Bissöffnung auf insgesamt 5-6 mm vergrößert werden.

Die Mittellinie sollte kontrolliert werden, da manche Patienten beim Protrudieren des Unterkiefers lateral unphysiologisch ausschwenken.

Zur Bissregistrierung eignen sich gefaltete verschwemmte Wachsplatten sowie Bisswälle oder aber die George Gauge Bissgabel.

Vorgehen Konstruktionsbiss



Bissituation in Zentrik erfassen




Patient die Bewegungen der maximalen Protrusion (100%) bei geöffneten Mund ohne Konstruktionsbiss ausführen lassen



Den Unterkiefer 30-40% retrudieren
Konstruktionsbiss mit 60–70 % der max.
Protrusion und mind. 4 mm Bissöffnung in der
Front



Erwärmter Wachs-biss oder George Gauge
Bissgabel verwenden und gut auf die untere
Zahnreihe andrücken

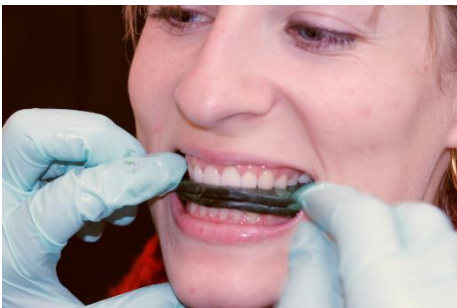

Auf gute Einbisse aller Zähne achten

→ Eindeutige Konturierung erforderlich



Biss replizieren und kontrollieren

→ Allfällige physiologische Mittellinie-
Abweichungen auf dem Auftragsformular
notieren

Bei Unklarheiten nehmen wir gerne auch zwei
Bisse entgegen und wählen in Absprache mit
dem Behandler den besseren aus.

Digital:

Bei Intraoralscans den Konstruktionsbiss
replizieren und den Okklusionsscan auf beiden
Seiten bukkal vollziehen

Der abgeschlossene und nachbearbeitete Scan
an das Labor übermitteln

