

## InfoApéro vom 15. September 2016 „Schlafapnoe und die Zahnarztpraxis“

### Vorabklärung mit Home-Screening oder im Schlaflabor

Für eine fundierte Diagnose vermieten wir das Screening-Gerät ApneaLink. Während der Nacht schläft die Patientin / der Patient damit bequem zu Hause.

Das Gerät liefert alle relevanten Daten wie Atemfluss, Schnarchereignisse, Apnoen, Hypnoen, Puls und Sauerstoffsättigung.

Die Miete für eine Messdauer beträgt CHF 89.90.

Auf Wunsch offerieren wir nach ca. zwei Monaten eine zweite Messung als Erfolgskontrolle.

Diese Messung mit Schiene ist kostenlos.



### Vorgehen Konstruktionsbiss



Bissituation in Zentrik erfassen




Patient die Bewegungen der maximalen Protrusion (100%) bei geöffneten Mund ohne Konstruktionsbiss ausführen lassen




Den Unterkiefer 30-40% retrudieren  
Konstruktionsbiss mit 60–70 % der max. Protrusion und mind. 4 mm Bissöffnung in der Front

→ Bei Knirschen oder Bruxismus auf stärkere Bissöffnung achten, damit die zirkulären Aufbisse der einzelnen SomnoDent-Schienen etwas robuster gestaltet werden können.

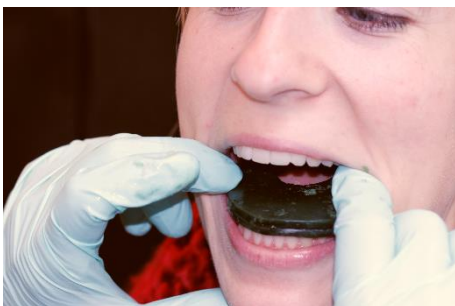

Erwärmter Wachsbiß oder George Gauge  
Bissgabel verwenden und gut auf die untere Zahnreihe andrücken

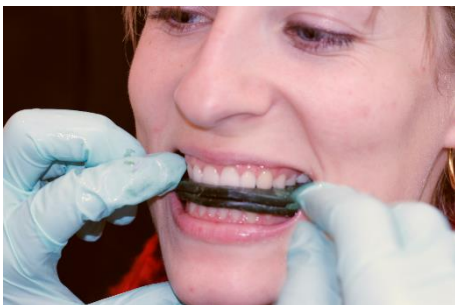

Auf gute Einbisse aller Zähne achten

→ Eindeutige Konturierung erforderlich



Biss replizieren und kontrollieren

→ Allfällige physiologische Mittellinie-Abweichungen auf dem Auftragsformular notieren

Bei Unklarheiten nehmen wir gerne auch zwei Bisse entgegen und wählen in Absprache mit dem Behandler den besseren aus.



Digital:

Bei Intraoralscans den Konstruktionsbiss replizieren und den Okklusionsscan auf beiden Seiten bukkal vollziehen

Der abgeschlossene und nachbearbeitete Scan an das Labor übermitteln

### **Übermittlung der Unterlagen an unser Labor**

Digital oder Express-Sendung  
Fertigstellung der SOD in 3 Wochen

### **Abgabe der UPS und Instruktion durch die Zahnärztin / den Zahnarzt**

Die Produkt- und Pflegehinweise sind der SomnoDent-Box beigelegt.  
Der Patient wird informiert über die Eingewöhnungszeit und evt. muskuläre Schmerzen.  
Die SOD kann angepasst und indirekt unterfüttert werden.

- ➔ Der elastische Teil ist mit einem grobkörnigen Gummi niedertourig reduzierbar
- ➔ Bei Neuversorgungen sind 1-2 Zähne gut ausschleifbar
- ➔ Bei mehr als 2 Zähnen empfehlen wir eine indirekte Unterfütterung (Fertigstellung in 2 Wochen)

### **Zur Kontrolle ist die UPS bei jedem Zahnarzttermin mitzunehmen**

Das Reinigungspulver Cetron zur Zahnsteinentfernung ist bei uns erhältlich.  
Chemische Verfärbungen können aufgrund von Füllungen entstehen. Die Verfärbungen haben keinen Einfluss auf die Qualität der Schiene.

- ➔ Bei neuer Zahnversorgung ist die UPS unbedingt einzubeziehen
- ➔ Alle Modelle sind bei uns digital archiviert und können bei Bedarf (z.B.: Kontrolle der dentalen Nebenwirkungen) an die Praxis übermittelt werden

## Studien auf www.obu.ch

OrthoConnect Suche Über uns OrthoNews OrthoLetter OrthoWissen **OrthoFiles**

bussmann OrthoDontie OrthoDigital OrthoFolio® SomnoSwiss® AufbissSchiene SportSchutz

\*\*\*

**SchnarchSchiene Zahnärzte**

- Von der Anamnese zur UPS
- George Gauge Bissgabel
- Infos und Bissnahme
- George Gauge Hinweise

Alle anzeigen 1 - 20 / 31

\*\*\*

**SchnarchSchiene Zahnärzte**

- Von der Anamnese zur UPS
- George Gauge Bissgabel
- Studie SomnoDent \_Charité Studie Deutsch
- Studie SomnoDent \_ Comparison of dental side effects
- Studie SomnoDent \_ MAD side effects on TMJ
- Infos und Bissnahme
- George Gauge Hinweise
- Studie SomnoDent \_ Cistulli
- Studie SomnoDent \_ CPAP vs MAD and blood pressure

www.obu.ch → OrthoFiles → „Alle anzeigen“ → SchnarchSchiene Zahnärzte

## Krankenkassen - Auszug aus der Mittel- und Gegenstandliste (MiGeL)

Kapitel 23 ORTHESEN					
Positions Nr.	L	Bezeichnung	Menge Einheit	HVB	Gültig ab
<b>23.26</b>		<b>Unterkiefer-Orthesen</b>			
23.26.01.00.1	L	Unterkiefer-Protrusionsorthese Limitation: Behandlung des Schlafapnoe-Syndroms (SAS) bei Ablehnung oder Intoleranz gegenüber der klassischen Behandlung mit kontinuierlichem positivem Atemwegsdruck (CPAP); max. ein Gerät alle 3 Jahre	1 Stück	500.00	01.07.2014 N

## Abrechnungsmuster SomnoDent

### Zahnarzt

4000	Befundaufnahme	(18-24)	<b>18</b>
4805	Besprechung Patient	(39-53)	<b>39</b>
4090	Abformung Kiefer OK	(10-13)	<b>10</b>
4090	Abformung Kiefer UK	(10-13)	<b>10</b>
4817	Bimaxilläres Gerät	(112-152)	<b>112</b>
4860	Einfache Kontrollsitzung	(12-16)	<b>12</b>
4080	Schnellübertragung Mittelwert	(14-19)	<b>14</b>
4811	Instruktion Patient	(14-19)	<b>14</b>

**229**

Taxpunktwert 3.10  $229 \times 3.10 =$  **709.90**

Laborkosten gemäss LS **987.80**

Kosten total **1' 697.70**

### Anmerkung:

Bei der Berechnung wurde jeweils immer der tiefste Taxpunkt verwendet.  
Taxpunktwert ist der verlangte für die Sozialversicherungen.