

OrthoFolio[®]

Die transparente Folienapparatur
für Zahnstellungskorrekturen

bussmann



OrthoFolio®

Die unsichtbare Alternative zur Zahnspange

OrthoFolio® vereint sämtliche Vorteile der bekannten Aligner-Systeme und ist von A bis Z ein in unserem Labor hergestelltes **+** Schweizer Produkt.

Eine Abfolge von transparenten, elastischen Spezialfolien bewegt die Zähne sanft und in kleinen Schritten in die gewünschte Position.

OrthoFolio® ist eines der präzisesten Aligner-Systeme auf dem Markt, weil die Korrektur nach drei Behandlungsschritten immer auf der Basis eines neuen Abdrucks fortgesetzt wird.

Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung mit OrthoFolio® und von zahlreichen kostenlosen Dienstleistungen

- Sie bezahlen nur die effektiven Kosten.
- Die Behandlungsplanung kann jederzeit an veränderte Bedürfnisse angepasst werden.
- Sie erhalten eine kostenlose digitale Analyse für die Patientenbesprechung mit KV und animierten 3D-Bildern (via *OrthoConnect*).
- Attachments und Gummizüge verbessern die Wirksamkeit.
- Wir erstellen KV oder Behandlungsschienen innerhalb nur einer Woche.
- Ersatzschienen sind in wenigen Tagen lieferbar.



OrthoFolio® ist effizient und bietet viele Vorteile



- Grosse Erfahrung unseres Labors mit über 30000 hergestellten Schienen
- Unsichtbare und ästhetische Zahnschienen
- Schonende und wirkungsvolle Zahnstellungskorrektur
- Hohe Präzision dank computergestützter Planung und Herstellung
- Leicht entfernbar für die uneingeschränkte Mundhygiene
- Stripping kann gezielt vorgenommen werden
- Zahnbewegung ist klar kontrolliert
- Brillant o. Ä. kann eingebaut werden
- Jede Schiene entspricht einem Behandlungsschritt
- Dank neuen Abformungen nach drei Korrekturschritten gehört OrthoFolio® zu den präzisesten Aligner-Systemen!
- Fortlaufende Nummerierung von 1 bis 9 auf jeder Schiene



Indikationen

- Korrektur von Fehlstellungen im Frontzahnbereich
- Lückenschluss nach Extraktion im UK-Frontzahnbereich
- Präprothetische Korrekturen
- Für Patientinnen und Patienten mit Metallunverträglichkeit
- Finishing nach kieferorthopädischer Behandlung
- Rezidivkorrektur nach kieferorthopädischer Behandlung

Vorgehen (Praxis–Labor–Praxis)


- Präziser OK- und UK-Alginat-Abdruck oder Intraoral-Scan



- Übermittlung der Unterlagen mit Behandlungsziel an unser Labor



- Kostenvoranschlag und digitales Setup an Praxis per Post oder *OrthoConnect*

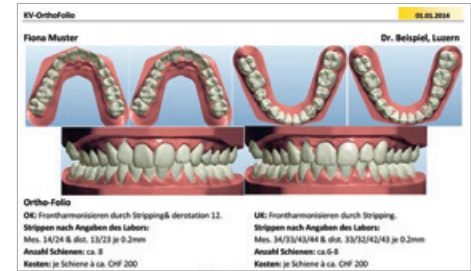

OrthoConnect

OrthoConnect ist die kürzeste und informativste Verbindung zwischen Ihrer Praxis und unserem Speziallabor.

OrthoConnect erleichtert die Auftragsabwicklung und Kommunikation mit unserem Labor. Es enthält alle Unterlagen wie 3D-animierte Bilder, Fotos sowie die Behandlungsprognose mit Angaben zu Strippping und Retention. *OrthoConnect* unterstützt damit ein informatives Patientengespräch.

Erster Schienensatz

- Initialisierungsschiene (dünner, weniger Kraft = angenehmer für die Patientinnen und Patienten)
- 1. Behandlungsschiene
- 2. Behandlungsschiene
- 3. Behandlungsschiene
- Aufbewahrungsbox mit Patientenhinweisen
- Informationen an Praxis zu Strippping, Attachments und allenfalls neuem Abdruck für Fortsetzung

- **OrthoConnect** enthält alle relevanten Unterlagen

Müller Fritz	
Auftrag	Auftrag OrthoConnect 26570 02.09.2015 R: 102484Auftrag 578.pdf
Upload Mandat (STU)	Upload 5 02.09.2015 R: 102485-Lst
Auftrag	Auftrag OrthoFolio 26578 02.09.2015 R: 102436Auftrag 578.pdf
Upload Mandat (STU)	Upload 5 02.09.2015 R: 102425-Lst
Auftrag	Auftrag OrthoConnect 26577 02.09.2015 R: 102434Auftrag 578.pdf
Upload Mandat (STU)	Upload 5 02.09.2015 R: 102405-Lst
Auftrag	Auftrag OrthoConnect 26576 02.09.2015 R: 102396Auftrag 578.pdf
Upload Mandat (STU)	Upload 5 02.09.2015 R: 102385-Lst
Auftrag	Auftrag OrthoFolio 26575 02.09.2015 R: 102376Auftrag 578.pdf
Upload Mandat (STU)	Upload 5 02.09.2015 R: 102365-Lst
Auftrag	Auftrag OrthoFolio 26574 02.09.2015 R: 102356Auftrag 578.pdf
Upload Mandat (STU)	Upload 5 02.09.2015 R: 102345-Lst
ivv OrthoFolio	
Auftrag	Auftrag OrthoFolio 26573 02.09.2015 R: 102328Auftrag 578.pdf
Upload Mandat (STU)	Upload 5 02.09.2015 R: 102320-Lst
Upload Mandat (STU)	Upload 5 02.09.2015 R: 102315-Lst

- Nach einer Woche senden wir den **ersten Schienensatz** in die Praxis mit Informationen über das Stripping. Nach drei Behandlungsschienen neuer Abdruck und Fortsetzung der Behandlung.



Die Patientin/der Patient wechselt die Schienen alle zwei Wochen.

- Bei Schienenwechsel immer exakten Sitz der letzten Schiene prüfen. Folgeschiene erst bei passiver Vorgängerschiene einsetzen!

Bedingt durch die für die Zahnbewegung notwendige Elastizität der Schiene bleibt das Ergebnis immer leicht hinter der Modellvorgabe zurück.

Wichtige Hinweise für Ihre Patientinnen und Patienten

- Die Tragdisziplin bestimmt die Wirksamkeit der Behandlung.
- Die Schienen müssen 24 Stunden pro Tag getragen werden (nur zum Essen entfernen).
- Jede neue Schiene verursacht leichte Spannungsschmerzen. Die Spannung sollte nach wenigen Tagen verschwinden.

- Die neue Schiene hat anfänglich noch «Luft» und wird durch aktives Tragen immer besser passen, bis sie mit dem geplanten Behandlungsschritt übereinstimmt.
- Mit der Schiene keine heißen Getränke trinken
- Schiene vorsichtig mit wechselnden, kleinen Wiegebewegungen entfernen (Bruchgefahr!)

Schienenpflege

- Reinigung nur mit lauwarmem Wasser (evtl. Geschirrwaschmittel oder Mundwasser verwenden)
- Weder scharfe Reiniger noch Zahnpasta verwenden
- Kein heisses Wasser verwenden, da zu hohe Temperaturen die Schiene verformen und sie unbrauchbar machen

Bussmann Orthodontie-Labor AG
Frankenstrasse 7a, Postfach 2363
6003 Luzern
T 041 210 00 03
F 041 210 99 03
info@obu.ch

www.obu.ch

