

CINNA® Care Solution

für die verbesserte Mundhygiene
mit zahntechnischen Apparaturen

CINNA als Reinigungslösung

Dank der CINNA Care Solution wird die Apparatur antibakteriell gereinigt, riecht frisch und lässt das Tragen angenehmer werden. Die CINNA Care Solution besteht aus 5 natürlichen Inhaltsstoffen, darunter Zimtaldehyd. Dies ist ein Pflanzenextrakt und stellt den Hauptbestandteil der Pflegelösung dar.



CINNA bei OrthoFolio® Behandlungen

Das ganze Potential der CINNA Care Solution wird zusammen mit Behandlungs- und Retentionsschienen von OrthoFolio ausgenutzt. Die pflanzenbasierte Beschichtung der Schienen kann die antibakteriellen Wirkstoffe aufnehmen und auch speichern. Die Schiene ist damit die einzige Zahnschiene weltweit, die gleichzeitig Kariesbakterien bekämpft und beim Tragen die Mundhygiene bis zu 22 Stunden unterstützt.

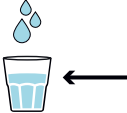
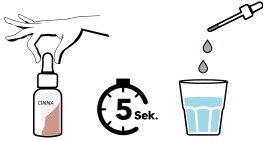



Detaillierte Informationen
und die Gebrauchsanwei-
sung finden Sie unter:



obu.ch

So einfach geht es

-  Ein Glas mit Wasser befüllen, so dass die Apparatur vollständig bedeckt ist.
-  Pipette drücken, loslassen, 5 Sekunden warten, bis die Lösung nach oben steigt. Pipette ins Wasser entleeren und verrühren. Mischverhältnis: 1x Pipette (ca. 2ml) : 50 ml Wasser
-  Zahnapparatur für 30 Minuten in die CINNA Lösung zur Reinigung bzw. zum Aufladen der Schiene legen.

Der Vorgang sollte täglich wiederholt werden.

CINNA ist eine eingetragene Marke der Firma Bussmedical AG