

Was ist OrthoFolio®?

Die effiziente und transparente Folienapparatur für Zahnstellungskorrekturen.

OrthoFolio® ist ein von unserem Labor entwickeltes Schweizer Produkt, und gilt mittlerweile als präzisestes System auf dem Markt. Für beste Verträglichkeit sind die handgefertigten Schienen neu aus pflanzlichem naturaligner® Material hergestellt – einer ebenfalls in der Schweiz entwickelten Technologie. Durch die spezielle Beschichtung dieser neuen Folie entsteht keine Mikroplastikabgabe im Mund.

Das OrthoFolio®-System vereinigt die Vorteile und Erfahrungen aus sämtlichen bekannten Systemen mit elastischen Materialien und ist das einzige Aligner System auf dem Markt, welches zu 100% Swiss Made ist.

Für welche Indikationen kann OrthoFolio® angewandt werden?

OrthoFolio® ist ein Aligner System zur ästhetischen Korrektur der Frontzähne. Mit unserer über 30-jährige Erfahrung mit Alignern, ergänzt durch ein breites Wissen in der Orthodontie, setzen wir Standards in der individuellen und optimalen Behandlungsplanung für Ihre Patienten.

Was dürfen Sie von uns erwarten?

Das Patientenwohl steht bei uns an oberster Stelle. Es ist uns wichtig, dass wir als Zahntechniker gemeinsam mit Ihnen als Behandler*in den bestmöglichen Behandlungserfolg für den Patienten erreichen. Dafür schätzen wir den engen Austausch mit Ihnen, um bereits in der Planung allfällige Unklarheiten zu klären, und das individuell bestmögliche Resultat erzielen zu können.

Zusammen mit dem Kostenvoranschlag erhalten Sie eine Behandlungsinformation, welche Ihnen eine optimale Terminplanung ermöglicht, da die am Patienten notwendigen Handlungen im Voraus definiert sind.

Welche Behandlungen sind mit OrthoFolio® möglich?

- ➔ Frontharmonisierung von Fehlstellungen im Frontzahnbereich
- ➔ Finishing nach einer Festsitzenden Behandlung
- ➔ Vorsorgebehandlung für eine spätere Implantierung
- ➔ Intrudieren/Extrudieren einzelner Zähne (bedingt möglich)
- ➔ Lückenschluss nach Extraktionen
- ➔ Für Patienten mit Metallunverträglichkeiten
- ➔ Rezidiv Korrekturen

Wieso OrthoFolio®?

- ➔ Individuelle Beratung
- ➔ Weltweit einzigartiges, pflanzliches Material (naturaligner®)
- ➔ Differenzierung Ihre Praxis mit innovativem Aligner System
- ➔ Planung bis Herstellung ausschliesslich in der Schweiz
- ➔ Flexibilität von digitaler bis manueller Anfertigung
- ➔ Individuelle Anfertigung der Attachments
- ➔ Lieferfrist maximum eine Woche

Sie möchten OrthoFolio® anbieten? Der Weg zu einem glücklichen Patientenlächeln: Die Zusammenarbeit Praxis – Labor, Schritt für Schritt

1. Sitzung Praxis

- Besprechung der gewünschten ästhetischen Korrektur
- Scan/Abdruck mit Auftrag ins Labor
- Neuer Termin mit Patienten vereinbaren

2. Arbeit Labor

- Erstellen eines Kostenvoranschlags inklusive detaillierter 3D-animierter Bilder und Behandlungsprognose innerhalb von 5 Arbeitstagen
- Sofort zum Download in unserer Cloudlösung OrthoConnect verfügbar

3. Sitzung Praxis

- Besprechung des Kostenvoranschlages mit dem Patienten
- Dem KV ist ebenfalls zu entnehmen, ob/wann ein neuer Scan/Abdruck für den Behandlungsstart benötigt wird
- Die Freigabe für das OrthoFolio® Starter Set kann per OrthoConnect (Chat), E-Mail oder mit neuem Scan/Abdruck und Auftrag an das Labor erfolgen

4. Arbeit Labor

- Herstellung des OrthoFolio® Starter Sets innerhalb von 5 Arbeitstagen
- Inhalt der OrthoFolio® Starter Box: 4 Behandlungsschienen, Übertragungshilfen für die Attachments und eine aktuelle, ausgedruckte Behandlungsinformation

5. Sitzung Praxis

- Der Behandlungsinformation entnehmen Sie, wo Attachments gesetzt werden müssen und ob ein Stripping notwendig ist
- Üben Sie mit dem Patienten das Einsetzen und Herausnehmen der Schienen
- Vereinbaren Sie spätestens 8 Wochen nach Behandlungsbeginn einen neuen Termin zur Kontrolle und zwecks Erstellen eines neuen Scan/Abdruck für das zweite Schienen Set

6. Sitzung Praxis

- Kontrolle des Sitzes der letzten Schienen
- Sofern alles wie gewünscht sitzt, neuen Scan/Abdruck ins Labor senden
- Die aktuell letzte Schiene wird getragen, bis das neue Schienen Set eintrifft

7. Arbeit Labor

- Herstellung des OrthoFolio® Folgesets innerhalb von 5 Arbeitstagen
- Inhalt des zweiten OrthoFolio® Schienen Sets: 3 Behandlungsschienen, Rückmeldung zum Behandlungsverlauf

8. Sitzung Praxis

- Abgabe des nächsten Schienen Sets, Kontrolle wie gut diese sitzt
- Vereinbaren eines neuen Termins in 6 Wochen zur Kontrolle und zwecks Erstellen eines neuen Scan/Abdruck für das dritte Schienen Set

➔ Nun wiederholt sich der Vorgang gemäss Planung im KV, und bis der Zahnbogen plangemäss steht.

9. Sitzung Praxis / Abschluss

- Der Zahnbogen steht wie gewünscht: Erstellen eines letzten Scan/Abdruck für die Retention
- Die aktuell letzte Schiene wird weiterhin getragen, bis zum Eintreffen der Retention