

SomnoSwiss[®] 
mieux dormir



Aide à soulager le ronflement
et l'apnée du sommeil pour un
réveil en pleine forme

Procédure



1. Examen préliminaire dans un laboratoire du sommeil, chez un pneumologue, chez un ORL ou à domicile



2. Mesure précise* de la situation buccale et réalisation d'un enregistrement de la protrusion (Au cabinet dentaire)



3. Scan intra-oral en position thérapeutique ou empreinte à l'alginat




4. Transmission à SomnoSwiss[®] : conception numérique de la gouttière et production par fabrication additive

***Mesures pertinentes pour la commande**

- Protrusion max. : overjet plus protrusion
- Rétrusion max. : rétrusion moins overjet
- Ouverture buccale max.
- Déviations de la ligne médiane :
 - en occlusion
 - protrusion max.

Sagittal : 50 % de la protrusion max.
Vertical : au moins 4 mm d'ouverture intermaxillaire
L'enregistrement de la protrusion doit être perçu comme agréable par le patient. Réduire l'enregistrement vestibulaire et contrôler dans la bouche.

SomnoSwiss® NOA

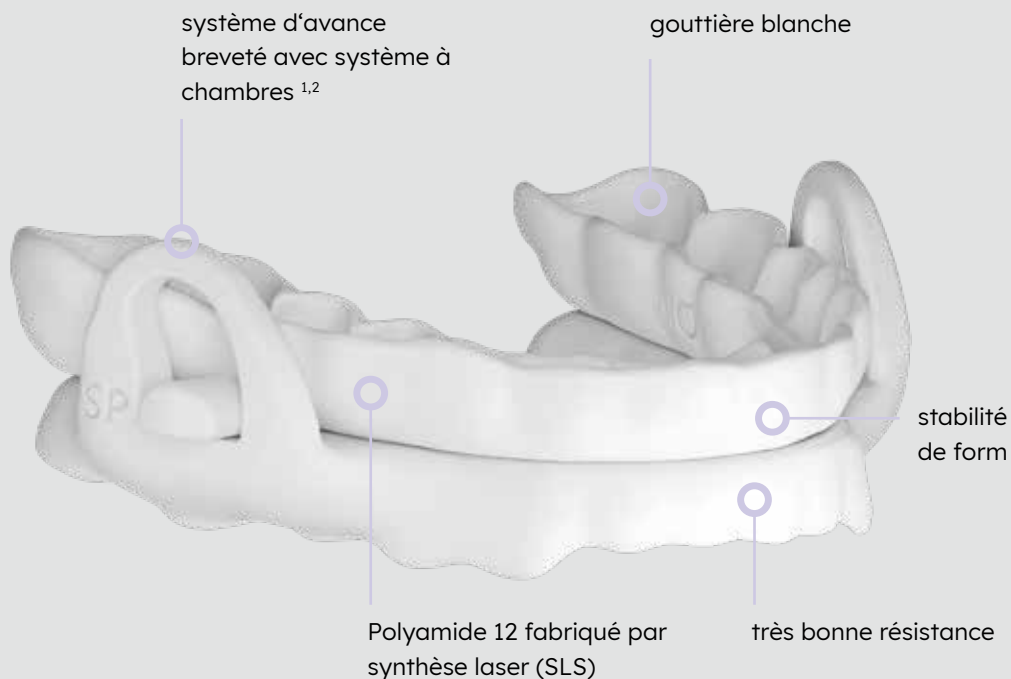

Gouttière d'avancement mandibulaire

La gouttière et les instructions sont fournies par le praticien. La gouttière doit être apportée à chaque rendez-vous chez le dentiste pour contrôle. En cas de nouveaux soins dentaires, les gouttières doivent être prises en compte.

Réglage précis avec gouttières interchangeables

L'efficacité d'une gouttière d'apnée du sommeil dépend de la position thérapeutique de la mâchoire inférieure. Les trois gouttières supplémentaires fournies dans le kit SomnoSwiss® NOA permettent un réglage précis de la protrusion.



-1 mm



Point de départ (PD)
selon la morsure



+1 mm



+2 mm

Si nécessaire, il est possible de créer des gouttières supplémentaires sans frais supplémentaires :

- Concerne les gouttières supplémentaires UK qui modifient la protrusion (+ ou -)
- L'offre est valable pendant la première année à compter de la date de commande
- Un nouvel enregistrement occlusal ou une nouvelle empreinte sont exclus de l'offre



Masque respiratoire à pression positive (CPAP)

Les gouttières d'avancement mandibulaire et la CPAP sont les traitements les plus efficaces contre le ronflement et surtout contre l'apnée du sommeil. Ces deux traitements ont été testés cliniquement et sont reconnus par les caisses d'assurance maladie.




Ronflement et apnée du sommeil

Causes et conséquences

Pendant le sommeil, les muscles se détendent. La position détendue de la mâchoire fait retomber la langue dans la gorge, ce qui rétrécit, voire obstrue les voies respiratoires. La respiration à travers ces voies rétrécies fait vibrer les tissus mous, ce qui produit les bruits de ronflement bien connus. Les interruptions respiratoires qui durent plus de 10 secondes sont appelées apnées.


Un sommeil non réparateur dû au ronflement et à l'apnée du sommeil nuit à la qualité du sommeil – y compris celle du partenaire – et réduit l'espérance de vie.

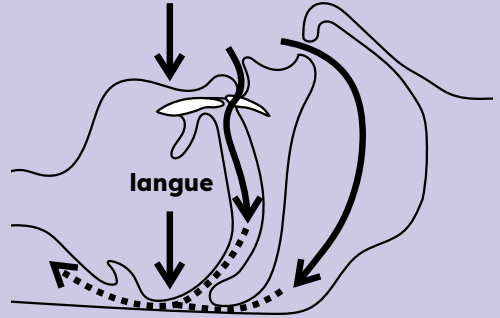


Thérapie anti-ronflement avec SomnoSwiss®

La gouttière d'avancement mandibulaire pousse la mâchoire inférieure de quelques millimètres vers l'avant. Cela raffermir les tissus mous et libère ainsi les voies respiratoires. La gouttière pour la mâchoire supérieure et inférieure est adaptée individuellement à l'aide d'empreintes dentaires, est facile à utiliser et peut être portée sans risque pendant la nuit.

Nos gouttières d'avancement mandibulaire sont composées de plastiques biocompatibles spécialement développés et fabriqués par fabrication additive, qui sont élastiques et garantissent ainsi un ajustement confortable et sûr.

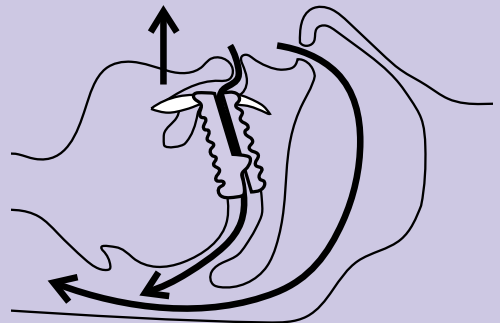


SomnoSwiss® : le centre suisse de compétence pour le traitement par gouttières de sommeil

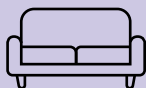

Confort élevé
Même effet dans toutes les positions de sommeil



Port confortable avec un minimum d'avance et un effet identique

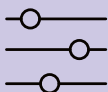

Adaptation gratuite: 5 gouttières supplémentaires pour la mâchoire inférieure




Matière biocompatible pour une tolérance maximale



Liberté de mouvement latéral en cas de bruxisme



Livraison rapide

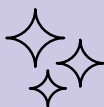

100 % sans métal



Conseils d'experts Swiss Made



Précision et reproductibilité grâce à la fabrication CAD/CAM




Matériau inbrisable

La première adresse en Suisse
pour le conseil et la fabrication de
gouttières de sommeil depuis plus
de 40 ans



**Caractéristiques des
gouttières d'avancement
mandibulaire SomnoSwiss[®]**

- ✓ Méthode thérapeutique sans risque
- ✓ Idéal en cas de refus de la CPAP ou d'autres thérapies
- ✓ Confortable à porter
- ✓ Permet de parler et d'ouvrir la bouche
- ✓ Aucune restriction pendant les voyages
- ✓ Les rangées de dents sont entièrement soutenues et sécurisées
- ✓ Nettoyage facile

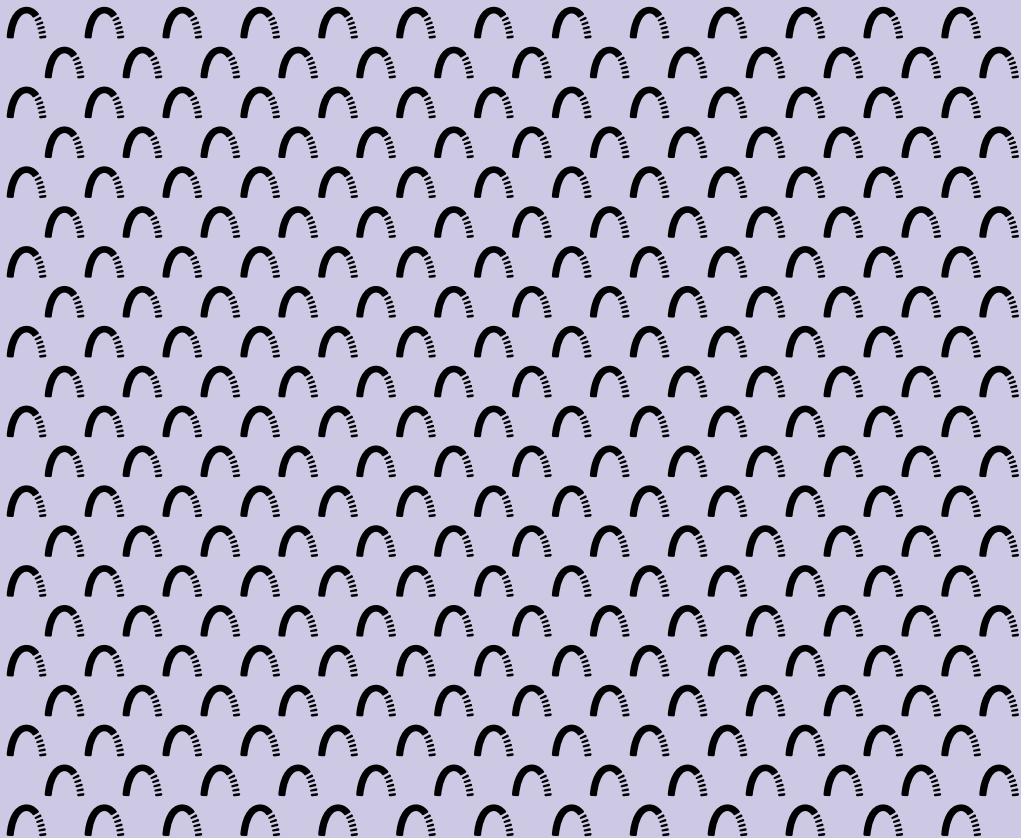

Quellen:

1) University of Malaga,
Spain, Dept of biomedical
engineering



2) Pedro Mayoral et al, Preliminary Results of a
New Mandibular Advancement Device, Journal
of Dentistry & Oral HealthDental Sleep Medici-
ne, Catholic University of Murcia, Spain



Bussmann Orthodontie-Labor AG
Frankenstrasse 7a
6003 Luzern
T 041 210 00 03
info@obu.ch

Informations complémen-
taires pour les patients et
les dentistes:



www.somno.swiss